

# L'appareil à désincrustation

## Présentation

Appareil produisant un courant galvanique continu, utilisé à la surface de la peau comme moyen efficace de désincrustation.


## Objectifs

- Nettoyer profondément les ostia.
- Saponifier le sébum.

## Le matériel

Coffret contenant un générateur de courant alternatif, transformé grâce à des diodes en courant continu et abaissé par un transformateur à 60 volts maxi, (ce courant est filtré par un condensateur pour qu'il soit le plus continu possible), avec :

- Un interrupteur marche/arrêt.
- Un bouton de réglage pour varier l'intensité.
- Une borne rouge correspondant au pôle positif.
- Une borne noire correspondant au pôle négatif.
- Un fil rouge et un fil noir.
- Une poignée pour fixation d'un tampon de coton.
- Une poignée métallique qui sera tenue dans la main de la cliente.

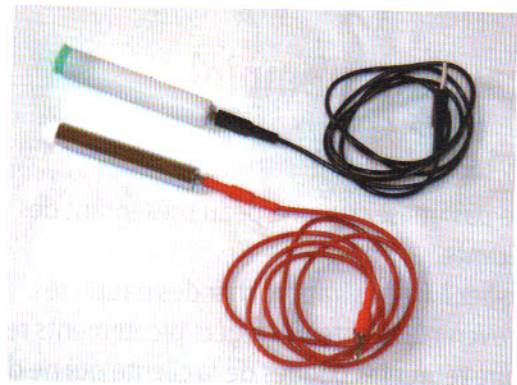

## Les produits

Solution désincrustante (chlorure de sodium + eau).

Soins du visage

## La technique

*Chronologie dans le soin : après la vaporisation / après, avant ou à la place de l'extraction des comédons.*

1. Vérifier que le potentiomètre soit à 0.
2. Donner l'électrode métallique à la cliente, la lui faire tenir à pleine main, cette électrode sera reliée à la borne rouge positive.
3. Imbiber un coton d'eau du robinet, l'essorer et le tremper dans la solution désincrustante, le fixer sur l'électrode porte-tampon reliée à la borne noire négative.
4. Mettre l'interrupteur sur marche.
5. Promener le tampon sur les zones à traiter, principalement l'axe médian du visage, le faire glisser sans le décoller de la peau.
6. Régler l'intensité selon la sensibilité de la cliente, ne pas dépasser 2 mA.
7. Remettre le bouton de réglage de l'intensité à 0 à la fin de la séance avant de décoller le tampon.

## Indications

Actions		Effets attendus	Types de peau
Chimique	Transformation du sébum en savon. Au contact du courant galvanique, la solution désincrustante se transforme en soude. La soude au contact du sébum forme un savon (saponification).	Élimination des comédons et du sébum	Peau séborrhéique

## Précautions d'emploi

### Vis-à-vis de la cliente :

- Ne pas utiliser sur une peau présentant des traces de boutons, dermatose, égratignure ou cicatrice récente.
- Veiller à ne pas s'approcher des paupières.
- Prévenir la cliente des légers picotements ressentis.
- Faire retirer les bagues de la cliente qui ne doivent pas être en contact avec le métal de l'électrode tenue dans la main.
- Vérifier que la main ou le pied ne trempe pas dans l'eau pendant la séance.
- Prévenir du goût métallique dans la bouche lié à la présence du métal comme les plombages ou bridges.

### Vis-à-vis de l'appareil :

- Vérifier le bon état des fils électriques et des électrodes.