

FICHE APPAREIL N°5 :

VAPORISATEUR D'OZONE

(TTP sauf peaux sensibles/Atones, troubles vasculaires/problèmes respiratoires/cliente nerveuse)



Utilité → Vaporisateur de vapeur sur la surface de la peau avec ajout d'ozone ou/et d'essences (huiles essentielles)

Utilisation

- Après le gommage
- Remplir le réservoir au 2/3 d'eau déminéralisée
- Désinfecter l'appareil
- Brancher l'appareil, allumer le bouton vapeur
- Dès que l'appareil émet de la vapeur (allumer l'ozone)
- Tester son poignet + poignet cliente
- Diriger le jet à 30-40 cm du visage (charlotte + cotons humide sur yeux)

Durée : 10 minutes

Entretien

- Vérifier les fils électrique et remplissage d'eau dans la chaudière
- Nettoyer le réservoir, détartrer et désinfecter régulièrement