

FICHE APPAREIL N°8 :

APPAREIL IONOPHORESE

Utilité → Faire pénétrer les principes actifs d'une ampoule aqueuse (ou avant le modelage) gel ionisable dans un but d'embellissement (Amincir, raffermir, prévenir le vieillissement).

Durée : 10 m



Fonction

Appareil électrique (courant galvanique 220V/50HZ), permettant d'augmenter la perméabilité de la peau et ainsi faire mieux pénétrer les actifs cosmétiques. Les ions sont attirés par l'électrode de signe contraire.

Précaution d'emploi

- Désinfecter l'appareil
- Retirer les bijoux
- Eviter toutes lésions cutanées (boutons, dermatoses, égratignures)
- Vérifier état fils électriques et électrodes
- Pas d'eau à proximité
- Prévenir goût de fer (si amalgames dentaire)
- Prévenir la cliente sensation de picotement

Technique

1. Vérifier la peau non grasse
2. Appliquer l'ampoule ou gel
3. Vérifier que le potentiomètre est à 0

4. Brancher les électrodes :
 - Indifférente → Dans la main de la cliente
 - Active → Sur la peau (rouleau ; circulaire)
5. Balayer le visage du cou → haut visage augmenter l'intensité au niveau du décolleté et diminuer ensuite
6. Remettre le potentiomètre à 0 avant de retirer les électrodes de la cliente
7. Nettoyer le porte-électrode et électrode avant/après chaque usage