

FICHE APPAREIL N°9 :

APPAREIL DEPRESSO ASPIRATION

Utilité → Mode Aspiration : Appareil exerçant sur la peau une aspiration par l'intermédiaire de ventouses (de formes variées) dans le but :

(Après modelage)

- Provoquer une hyperhémie
- Lisser les rides
- Assouplir la peau
- Nettoyer (évacuer l'excès de sébum et comédons)



(Attention pas pour peau sensible/fine/pb vasculaire)

Utilisation

- **Aspiration ponctuelle** : - Poser la ventouse, boucher le trou avec l'index, pratiquer une succion de 2 secondes, retirer l'index, déplacer la ventouse et recommencer.
- **Aspiration continue** : - Même procédé à l'exception que la ventouse glissera sur la peau sans la décoller ni retirer l'index

Ventouses :

- **Tire-comédons (Peaux séborrhéique)** → Aspiration ponctuelle à sec (vider les follicules pilo-sébacés)
- **Ventouse Petit diamètre/gros diamètre (peau atone/sénescence)** →

Ventouses	Type de peaux	Chronologie	Utilisation	But
Tire-comédons	séborrhéique	Après vaporisateur	Aspiration a sec	Vider les follicules pilo-sébacés
Petit diamètre	Atone/Sénescente	Avant ampoule Après modelage	Aspiration ponctuelle complétement Jacquet	Hyperhémie Pénétration ampoule
Gros diamètre			Aspiration ponctuelle Sur ovale visage/décolletée	Complète le modelage Hyperhémie Stimulante
Antinides			Application ponctuelle Dans le creux de la ride	Lissage hyperhémie

PULVERISATION A COMPRESSEUR

Utilité → Parfaire le retrait du masque et rafraîchir/relaxe avec une lotion adaptée (action des principes actifs)

Utilisation (Mettre charlotte + barbier + position assise pour la cliente)

1. Remplir le flacon : lotion + eau
2. Brancher et allumer l'appareil
3. Placer le barbier
4. Tenir le flacon avec pouce et majeur - l'index bouche l'orifice d'amorçage
5. Diriger le jet à 20 cm du visage - Balayer lentement
6. Protéger les voies respiratoires et essuyer la cliente avec une éponge
7. Sécher avec un mouchoir en papier

Précaution

- Désinfecter l'appareil + ventouses avant/après usage
- Vérifier état des fils