


4.4 L'APPAREIL D'ASPIRATION A POMPE A VIDE

4.4.1 Introduction

Les différents types de ventouses de formes différentes qui vont permettre une succion sur la peau et offrir ainsi de nombreuses actions.

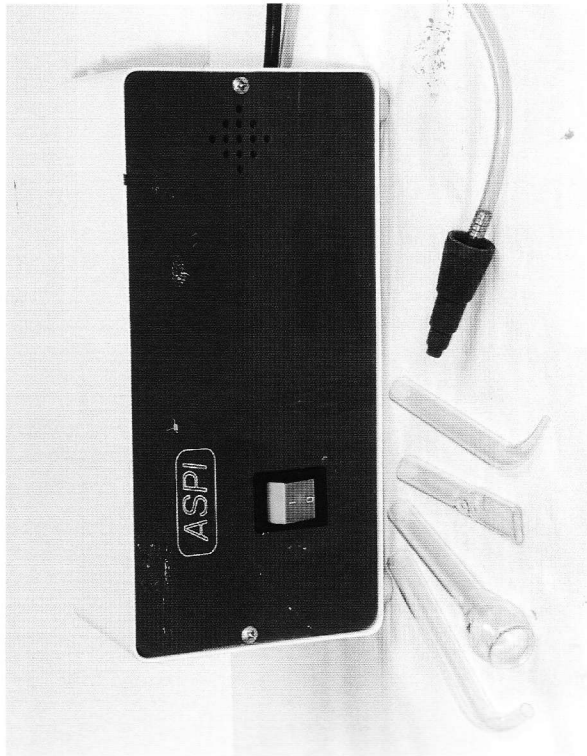

4.4.2 Mode d'emploi

- Brancher l'appareil.
- Choisir une ventouse en fonction de l'action recherchée, la positionner sur l'embout du tuyau en plastique.
- Mettre l'interrupteur sur "marche".
- A l'aide du bouton du potentiomètre régler l'intensité de l'aspiration.
- Savoir que plus le diamètre de la ventouse est grand, plus la succion est puissante.

4.4.3 Précautions à prendre envers le modèle et l'appareil

vers le modèle

- Ne pas utiliser sur une peau présentant des imperfections vasculaires.

vers l'appareil


- Après chaque utilisation, nettoyer les ventouses dans une solution bactéricide.

4.4.4 Utilisation

La ventouse tir comédons



- Pour éviter de salir le tuyau en plastique, glisser un fin morceau de coton dans le corps de la ventouse pour filtrer les comédons.
- S'utilise à sec afin de vider les follicules pilosébacés de leurs comédons.
- S'utilise après une vaporisation, par ponctuation. C'est à dire que l'on pose la ventouse sur la peau, on effectue un quart de tour avant de la soulever en s'assurant d'avoir mis la puissance d'aspiration de l'appareil au maximum.

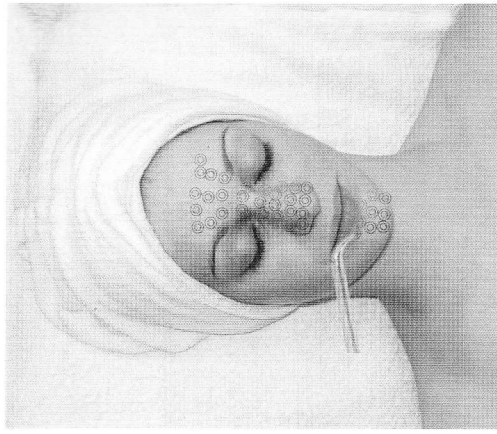

La ventouse de petit diamètre



- Elle s'utilise en complément des pincements Jacquet-Leroy.
 - Par ponctuation sur l'ensemble du visage en évoluant progressivement.
 - Sur tous les types de peau pour son action hyperhémiante.
 - Ne s'utilise pas pour les peaux sensibles.
- Ceci
- Avant le modelage.
 - Ou avant l'ampoule pour favoriser sa pénétration.