

L'appareil à haute fréquence

Présentation

Appareil électrique qui produit un courant alternatif de haute fréquence qui sera transmis à la surface de la peau par l'intermédiaire d'électrodes de formes variées.

Objectifs

- Décongestionner.
- Stimuler.
- Désinfecter.

Le matériel

- 1 • Un générateur de courant haute fréquence.
- 2 • Une poignée porte électrodes.
- 3 • Un interrupteur avec un voyant lumineux.
- 4 • Un bouton de réglage de l'intensité.
- Diverses électrodes MAC-INTYRE :
 - champignon violet (vide d'air partiel) pour l'effluvation ;
 - champignon orange (néon) pour l'effluvation ;
 - rouleau orange (néon) pour l'effluvation ;
 - électrode gutturale pour l'effluvation ;
 - électrode saturatrice pour étincelage indirect ;
 - électrode punctiforme pour étincelage direct.



Les produits



La technique

Chronologie dans le soin : Variable selon le mode d'application choisi.

1. Fixer l'électrode choisie sur le porte-électrodes.
2. Vérifier que le bouton de réglage soit au minimum.
3. Allumer l'interrupteur.
4. Régler l'intensité.
5. Tester l'intensité sur le poignet en effleurant la peau.
6. Opérer selon le mode d'application choisi en tenant compte de la sensibilité de la cliente.

Méthodes d'application

En effluation

Poser le doigt sur l'électrode.
 Amener l'électrode sur la peau de la cliente puis retirer le doigt.
 L'électrode effleure alors la peau lentement.
 Ne jamais perdre le contact.
 Pour retirer l'électrode du visage, poser de nouveau un doigt sur celle-ci.

En étincelage direct

L'électrode est légèrement éloignée de la peau afin de provoquer une pluie d'étincelles et un important dégagement d'ozone (puissance faible).

En étincelage indirect



Le courant de haute fréquence est conduit à travers la cliente qui est reliée au générateur par l'électrode condensatrice.
 L'électrode est tenue dans la main de la cliente. L'esthéticienne exerce sur la peau des pincements ou pianotements provoquant des petits picotements (puissance adaptée à la sensibilité de chacune).

L'électrode rouleau au néon

Après le modelage.

En effluvation

Utiliser sur les peaux sensibles pour les décongestionner.

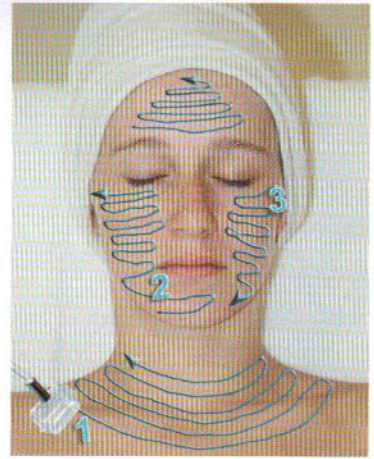
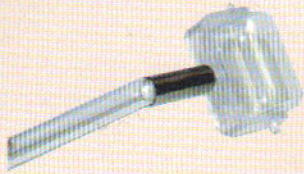


L'électrode gutturale ou arc de cercle

Après le modelage ou après l'ampoule.

En effluvation


Utiliser sur le cou pour son action tonifiante, stimulante.

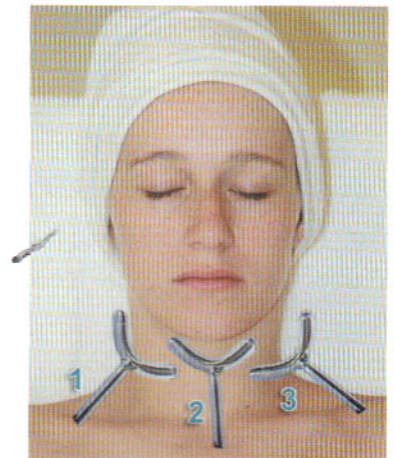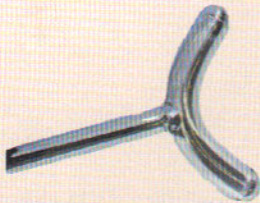

L'électrode champignon vide d'air (violet).

• En effluvation


Utiliser sur la peau grasse pour assécher la peau ou sur tous les types de peaux pour faire pénétrer l'ampoule.

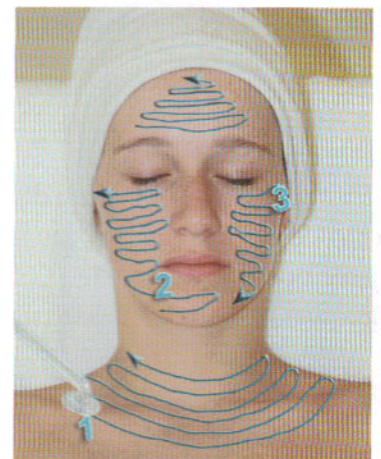
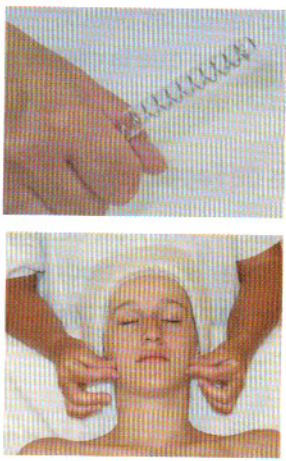


• En étincelage direct

Utiliser après l'extraction des comédons pour aseptiser les folliculites.

Positionner l'électrode sur les zones d'extraction des comédons.

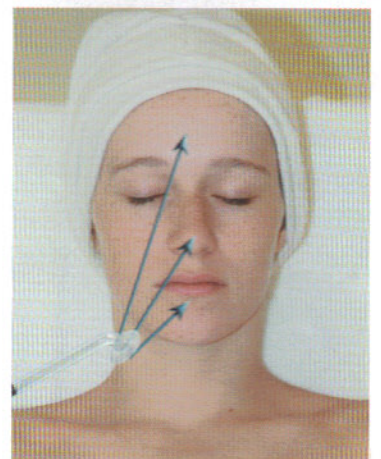

| | |
|---|---|
| <p>L'électrode pointue ou punctiforme</p> <p><i>En étincelage direct</i> Sur les folliculites ou après l'extraction des comédons pour aseptiser.</p> |  |
| <p>L'électrode condensatrice ou saturatrice</p> <p><i>En étincelage indirect</i> Utiliser sur les peaux sénescentes, ridées et atones pour son action stimulante, tonifiante. Utiliser à sec, avant le modelage, en pratiquant des pincements Jacquet-Leroy ou utiliser après l'ampoule pour favoriser sa pénétration.</p> |  |

Indications

| Actions | | Effets attendus | Types de peau | Mode d'application |
|----------|--|-----------------------------|-------------------|---|
| Chimique | Par le dégagement d'ozone | Assainissant | Peau séborrhéique | Etincelage direct |
| | Par la pénétration de l'ampoule ou gel | Vertus des principes actifs | Toutes les peaux | Effluation <i>(electrode violette)</i> |
| Physique | Par le courant haute fréquence | Décongestionnant | Peau sensible | Effluation <i>(électrode néon)</i> |
| | | Stimulant | Peau sénescence | Etincelage indirect |
| | | Cicatrisant | Peau séborrhéique | Etincelage direct |

Précautions d'emploi

Vis-à-vis de la cliente

- Vérifier les contre-indications :
 - Grossesse
 - Cliente nerveuse
 - Régulateur cardiaque
- Veiller à ce que la cliente soit parfaitement isolée des parties métalliques.
- Faire retirer les bijoux.
- Veiller à ce que la cliente ne trempe pas dans l'eau ou soit tenue par une autre personne.
- Ne pas utiliser sur une peau mouillée à l'alcool (risque de brûlure).

Vis-à-vis de l'appareil

- Vérifier le bon état des fils électriques.
- Nettoyer les électrodes à l'eau savonneuse après chaque utilisation.
- Protéger les électrodes de la casse, lors du rangement.

L'appareil vibrant

Présentation

Appareil électrique qui produit des vibrations transmises à la surface de la peau par l'intermédiaire de concusseurs de formes variables.

Objectifs

- Calmer.
- Décongestionner.
- Stimuler.
- Dissocier les amas adipeux.

Le matériel

Corps de l'appareil contenant l'électro-aimant qui anime la lame vibrante reliée à la tige vibrante, elle-même fixée à l'embout où s'adaptent les différents concusseurs, avec :

- Un système de réglage de l'amplitude de la vibration.
- Un interrupteur marche/arrêt.
 - Un cordon secteur.
- Différents concusseurs.

