

Précautions d'emploi

Vis-à-vis de la cliente

- Vérifier les contre-indications :
 - Troubles vasculaires
 - Problèmes respiratoires
 - Cliente nerveuse
- Respecter la distance.
- Contrôler la température.
- Protéger les paupières avec des compresses humides.
- Protéger les cheveux avec une charlotte.
- S'assurer que l'appareil « ne crache » pas avant de le diriger vers la cliente.

Vis-à-vis de l'appareil

- Vérifier le bon état des fils électriques.
- Vérifier l'éventuel blocage du bras articulé.
- Vérifier le fonctionnement de la lampe.
- Vérifier le niveau d'eau.
- Détartrer la chaudière ou le bocal régulièrement.

Le pulvérisateur tiède « Lucas Championnière »

Présentation

Appareil électrique permettant une projection en fines gouttelettes d'une lotion diluée additionnée de vapeur d'eau.

Objectifs

- Avoir un effet émollient.
- Favoriser la pénétration des principes actifs, donc renforcer l'action des produits.
- Remplacer la vaporisation chaude pour les peaux sensibles ou avec des rougeurs.

Le matériel

- ① • Une chaudière entourée par des résistances électriques, protégée par une gaine métallique.
- ② • Un interrupteur marche/arrêt.
- ③ • Une tête de sortie avec deux éjecteurs : un pour la vapeur, l'autre pour la lotion diluée.
- ④ • Deux godets, un pour le mélange eau + lotion, l'autre pour récupérer les gouttes de condensation.
- ⑤ • Un bouchon avec soupape de sécurité pour le remplissage de la chaudière.
- ⑥ • Un tube en verre pour visualiser le niveau d'eau.
 - Un cordon secteur.
 - Un mandrin.
 - Un entonnoir.



Les produits

- Eau déminéralisée
- Lotion

La technique

Chronologie dans le soin : après le gommage.

Préparation de l'appareil 10 minutes avant l'utilisation :

1. Remplir la chaudière aux 2/3 avec de l'eau distillée jusqu'au niveau d'eau indiqué.
2. Remplir le godet aux 2/3 d'une lotion diluée avec de l'eau.
3. Brancher et allumer l'interrupteur.
4. Dès l'émission d'un jet de vapeur additionné de la lotion diluée, saisir l'appareil et le maintenir en position verticale pendant la pulvérisation.
5. Déterminer la distance :
 - a. 20 cm pour un jet chaud.
 - b. 25 cm pour un jet tiède.
 - c. 30 cm pour un jet froid.
6. Balayer le visage avec le jet de vapeur.

Indications

Actions		Effets attendus	Types de peau
Chimique	Par la lotion	Variables selon les vertus des plantes contenues dans la lotion	Toutes les peaux
Physique	Par la température	Froid ⇨ Relaxant	
		Tiède ⇨ Émollient	
		Chaud ⇨ Vasomotricité des vaisseaux sanguins	


Précautions d'emploi

Vis-à-vis de la cliente

- Vérifier les contre-indications :
 - Troubles vasculaires
 - Problèmes respiratoires
 - Cliente nerveuse
- Adapter la distance en fonction de l'effet recherché.
- Essuyer régulièrement les gouttes de ruissellement.
- Si le modèle est en position assise, utiliser un barbier pour une meilleure protection.
- Protéger les orifices.
- Protéger les cheveux avec une charlotte.
- S'assurer que l'appareil « ne crache » pas avant de le diriger vers la cliente.

Vis-à-vis de l'appareil

- Vérifier le bon état des fils électriques.
- Vider la chaudière après chaque utilisation.
- Détartre régulièrement le réservoir.

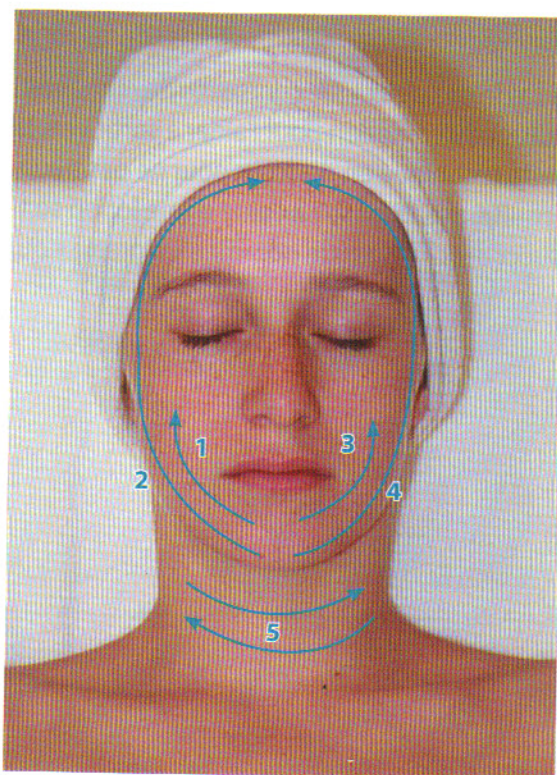

Traitement spécifique

L'extraction manuelle des comédons

Présentation

Technique manuelle de désincrustation des ostia qui peut se faire également avec un tire comédon, avec l'appareil à aspiration ou avec l'appareil de désincrustation.

Objectif

Retirer les comédons (points noirs) inesthétiques principalement localisés sur la zone médiane du visage, c'est-à-dire le front, le nez et le menton.

Le matériel

Des mouchoirs en papier.

Les produits

Un produit antiseptique.

La technique

Chronologie dans le soin : L'extraction s'effectue après avoir dilaté les ostia à l'aide de l'appareil à vaporisation.

1. À l'aide des deux index entourés de mouchoirs en papier, effectuer une légère pression parallèle à la peau, autour du comédon pour l'aider à sortir vers la surface et le libérer de cet inesthétique point noir. Réaliser cette technique en douceur pour ne pas traumatiser les tissus.
2. Ensuite, aseptiser soit à l'aide d'une lotion soit en utilisant l'appareil à Haute fréquence en étincelage direct avec l'électrode nommée « aigrette » ou l'électrode champignon.