


4.3 L'APPAREIL A HAUTE FREQUENCE

4.3.1 Introduction

L'appareil à haute fréquence ou à action électro-stimulante et à production de rayonnements ultra-violet est un appareil électrique qui produit un courant alternatif (sinusoïdal) de haute fréquence, transmis au corps par l'intermédiaire d'électrodes, de formes diverses, adaptées au soin de chaque type de peau.

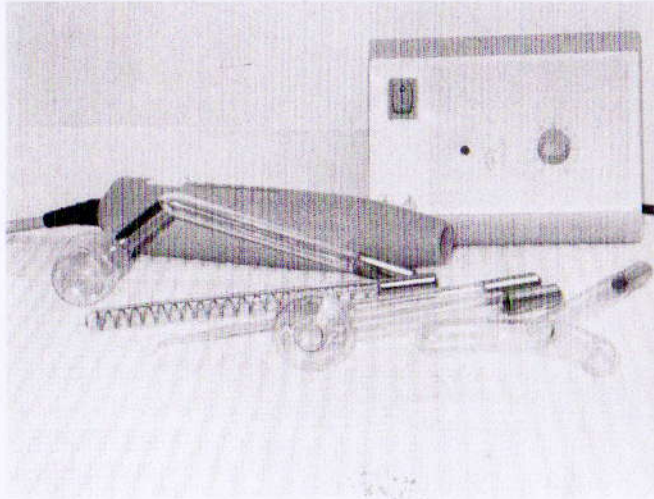

4.3.2 Mode d'emploi

- Bien choisir l'électrode en fonction du type de peau.
- Fixer l'électrode désinfectée sur le manchon porte électrode.
- Brancher l'appareil.
- Vérifier que l'intensité soit à 0.
- Régler l'intensité du courant en fonction de la sensibilité du modèle.
- Prévenir le modèle de ce qu'il va ressentir et entendre.
- Réaliser un test sur soi puis sur le modèle (sur le poignet).
- Travailler selon la méthode adaptée au type de peau.

En effluation

- Poser le doigt sur l'électrode.
- Amener l'électrode sur la peau du modèle puis retirer le doigt.
- L'électrode effleure alors la peau.
- Ne jamais perdre le contact.
- Pour retirer l'électrode du visage, poser de nouveau un doigt sur celle-ci.

En étincelage indirect

- Le courant de haute fréquence est conduit à travers le modèle qui est relié au générateur par l'électrode condensatrice.
- Des techniques manuelles provoquent des étincelles tonifiantes entre la peau et les doigts de l'esthéticienne.
- Remarque: augmenter l'intensité du courant progressivement.

4.3.3 Précautions à prendre envers le modèle et l'appareil:

Envers le modèle

- S'assurer que celui-ci ne porte pas de bijoux, et n'est pas en contact avec un support métallique (bras de fauteuil en fer...) ou en contact avec de l'eau (main qui trempe dans un bol à manucurie).

Envers l'appareil

- Vérifier que l'intensité soit au minimum avant de commencer et augmenter celle-ci progressivement en fonction de la sensibilité du modèle.

4.3.4 Utilisation

L'électrode rouleau au néon



Toujours en effluation

- S'utilise sur les peaux sensibles pour les décongestionner.
- Sur l'ensemble du visage et du cou sans perdre contact.
- On commence par le cou (1), puis on monte sur le menton, la joue, le dessous d'œil (2), la tempe, le front (3) et on redescend de l'autre côté (4) pour rejoindre le menton.

Ceci :

- Après le modelage ou après l'ampoule pour la faire pénétrer.



L'électrode Champignon

En effluation

- S'utilise sur la peau grasse pour assécher la peau, ou
- Sur tous les types de peaux pour faire pénétrer l'ampoule (suivre le schéma de l'électrode rouleau au néon).

En étincelage direct

- S'utilise après l'extraction des comédons pour aseptiser les folliculites.
- On positionne l'électrode sur les zones d'extraction des comédons (front, nez, menton) en restant à quelques millimètres de la peau.



L'électrode gutturale ou arc de cercle

En effluation


- S'utilise sur le cou ou le buste pour son action tonifiante, stimulante.
- On positionne l'électrode à la base de cou partant d'un côté (1), on descend le long du cou et on repositionne l'électrode au milieu (2), redescend, et on termine la même manœuvre sur le dernier côté du cou (3).



L'électrode condensatrice ou saturatrice

En étincelage indirect:

- S'utilise sur les peaux sénescentes, ridées et atones pour son action stimulante, tonifiante.
- Le modèle tient l'électrode dans une main pendant que l'esthéticienne fait des manœuvres actives, créant ainsi des étincelles entre ses doigts et la peau du modèle.
- Les manœuvres actives telles que les pianotements, les battages, les petits et grands pincements et les éventails sont réalisées avec de la crème de modelage.
- Peut s'utiliser à sec, avant le modelage en pratiquant des pincements Jacquet - Leroy.
- Peut s'utiliser après l'ampoule pour favoriser sa pénétration.

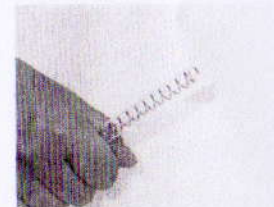

L'électrode pointue ou punctiforme

En étincelage direct :

- Sur les folliculites comme antiseptique.
- Après le modelage.

