

Utilisation Electrodes Haute fréquence



Electrode peigne:

Technique : Etincelage ou effluviation

Indications : Cuir chevelu gras, perte de cheveux pellicules ...



Electrode champignon orange:

Technique : Effluviation

Indications : Peaux sensibles, rougeurs diffuses

Actions : Apaiser / atténuer les rougeurs, stimulation douce



Electrode champignon violet:

Technique : Etincelage

Indications : Peux grasses et mixtes

Actions : aseptise peaux grasses, mixtes, resserre les pore, bactéricide



Electrode Punctiforme/pointue:

Technique : Etincelage directe

Indications : Sur les problèmes locaux (petits boutons, pustules) après l'extraction des comédons.

Actions : Favoriser la cicatrisation, limiter les risques d'infections.



Electrode Louche/cuillère

Technique : Effluation (orange) ou étincelage (violet)

Indications : s'emploi exactement de la même manière que les électrodes champignon mais avec une avec un meilleur accessibilité sur les coins du nez grâce à sa forme . zones de traitement les joues, le front, le nez.



Electrode pour le cou/fourche :

Technique : Effluation

Indications : pour le traitement du cou, du double menton, la nuque, les chevilles et les genoux.



Electrode de fulguration :

Technique : Effluation ou étincelage

Indications : pour le traitement pour éliminer les verrues, les cors



Electrode Rouleau masseur:

Technique : Effluation

Indications : Décongestionnant, pour traiter les varices, jambes lourdes, etc.



Electrode saturatrice/spiralée:

Technique massage indirect.

Active la circulation sanguine, régularise la tension artérielle, traite les insomnies, etc



Les modes d'utilisation

L'effluation :

Cette technique est réalisée avec une électrode contenant de la vapeur de mercure ou du néon.
Avant de placer ou de retirer l'électrode de la surface cutanée, le potentiomètre de l'appareil devra être sur zéro, sinon gare à l'étincelle ! L'esthéticienne pose l'électrode sur la surface à traiter et la déplace sans jamais perdre le contact peau/électrode.

L'étincelage direct :

Cette technique est réalisée avec une électrode contenant de la vapeur de mercure.
L'esthéticienne approche l'électrode à une très faible distance de la surface cutanée, sans jamais toucher la peau de la cliente. De petites étincelles se créent et permettent d'assainir la zone ciblée (comédons, boutons). Attention, il ne faut pas rester plus de quelques secondes sur une zone.

L'étincelage indirect:

Cette technique est réalisée avec l'électrode spiralée.
Augmentez progressivement le potentiomètre afin de s'adapter à la sensibilité de votre cliente.
Après application d'une ampoule traitante sur l'ensemble du visage, du cou et du décolleté, l'électrode spiralée est placée entre les mains de la cliente. L'esthéticienne réalise des pianotements ou petits pincements Jacquet Leroy sur les zones à traiter. De petites étincelles se créent sous ses doigts.

Elément conducteur	Electrode	Technique d'utilisation	Actions	Type de peau
Néon	Champignon, rouleau, fourche	Effluation	Décongestionne, calme et facilite la pénétration des principes actifs grâce au champ électrique créé (électro-osmose)	Sensible
Vapeur de mercure	Champignon	Effluation	Assainit, purifie et facilite la pénétration des principes actifs grâce au champ électrique créé (électro-osmose)	Grasse, mixte
Vapeur de mercure	Champignon, punctiforme	Etincelage direct	Assainit, purifie et favorise la cictrisation des lésions d'acné	Grasse à très grasse
Elément métallique	Electrode spiralée	Etincelage indirect	L'hyperhémie créée permet une meilleure nutrition, régénération et oxygénation cellulaire et favorise le renouvellement cutané	Atone